


cobas b101 血液検査方法 ～HbA1c測定～

ステップ1：指先を消毒し、穿刺器で穿刺します。

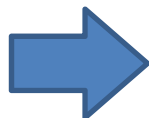

キャップを外す



深さを調整




ボタンを押す(穿刺)




1. 酒精綿で指先を消毒。よく乾かします。 2. キャップを外し、深度を調整し、穿刺します。

ステップ2：血液を試薬に点着します。

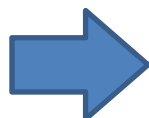

拡大

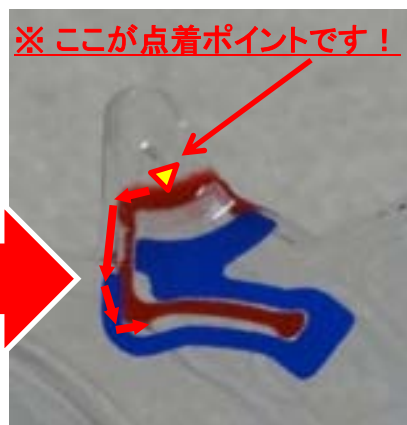

※ ここが点着ポイントです！


「カチッ・カチッ」と2回音が
鳴るまで閉める





3. 血液の滴を作ります。

4. 青く囲まれた部分を血液で満たし、カバーを閉めます。

ステップ3：試薬を機器に**60秒以内**にセットし、 カバーを開めると測定開始です！

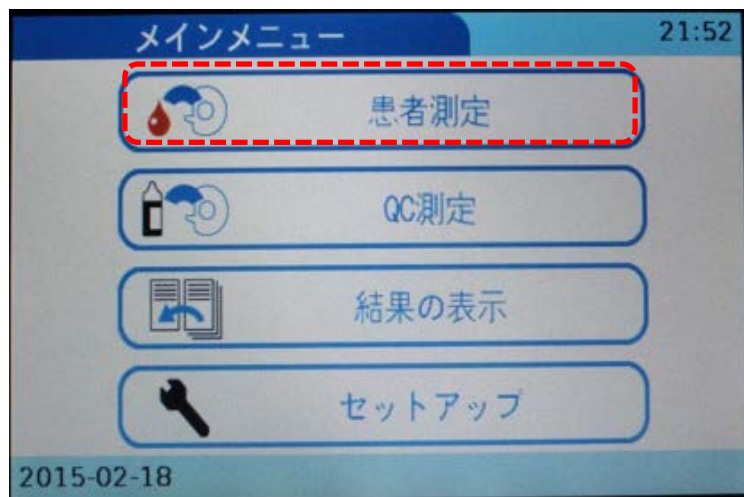

5. 患者測定を選択します。

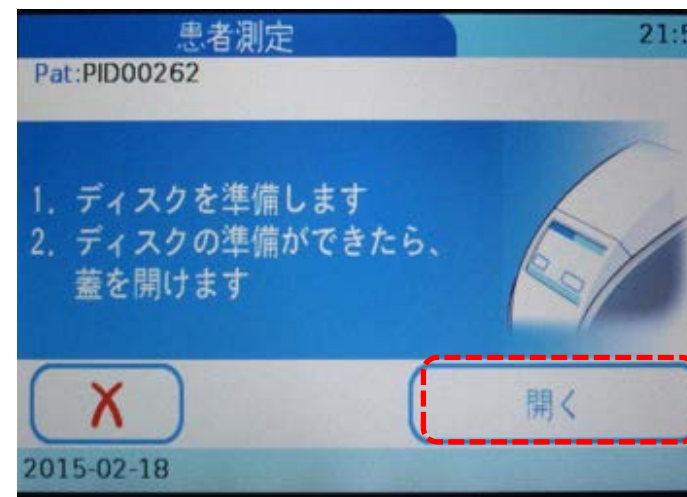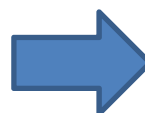

6. 開くを押します。



7. 試薬を60秒以内にセットし蓋を閉じると測定を開始します。



8. およそ6分で結果が表示されます。


cobas b101 血液検査方法 ～脂質測定～

ステップ1：指先を消毒し、穿刺器で穿刺します。




1. 酒精綿で指先を消毒。よく乾かします。 2. キャップを外し、深度を調整し、穿刺します。



ステップ2：血液を試薬に点着します。

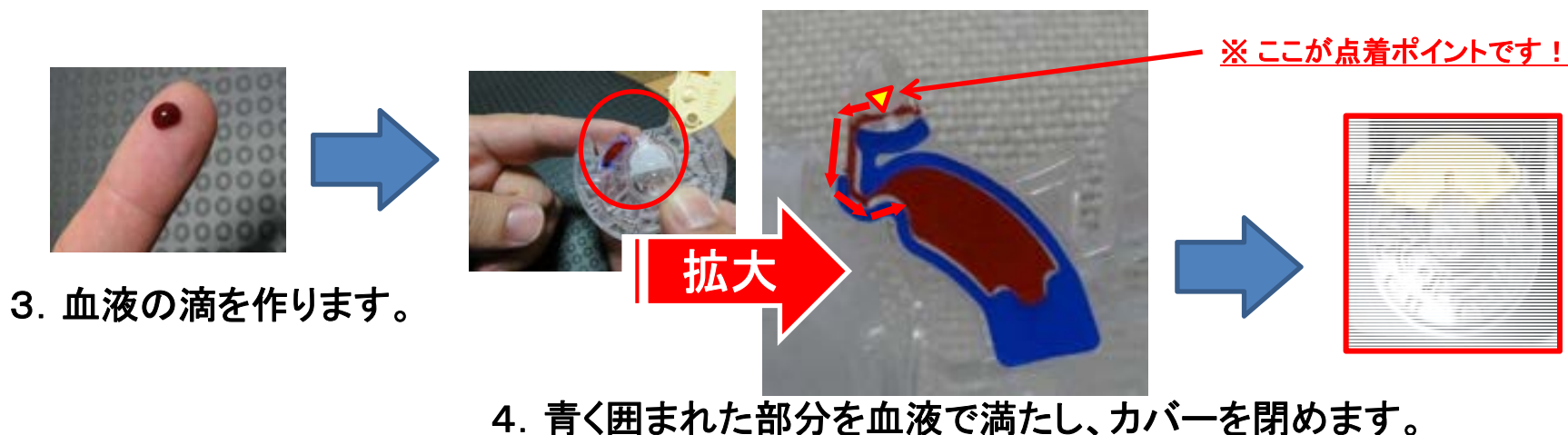


ステップ3：試薬を機器に**8分以内**にセットし、 カバーを開めると測定開始です！

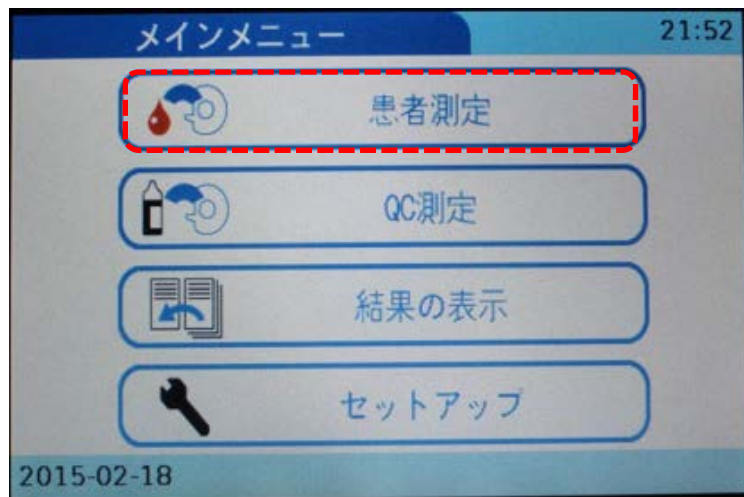

5. 患者測定を選択します。

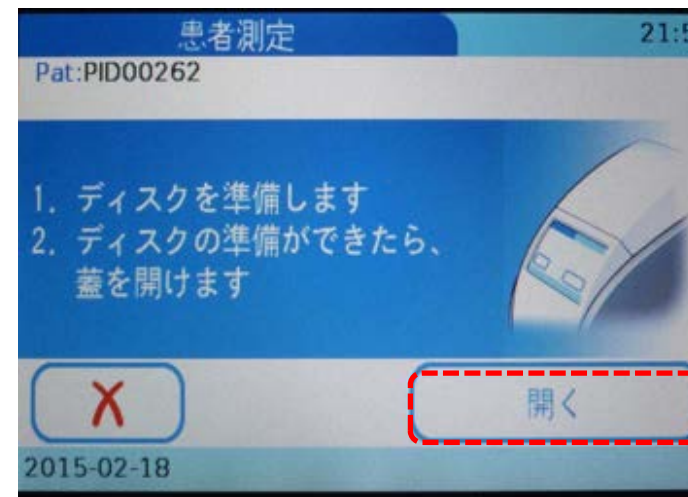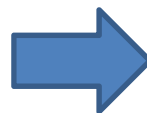

6. 開くを押します。

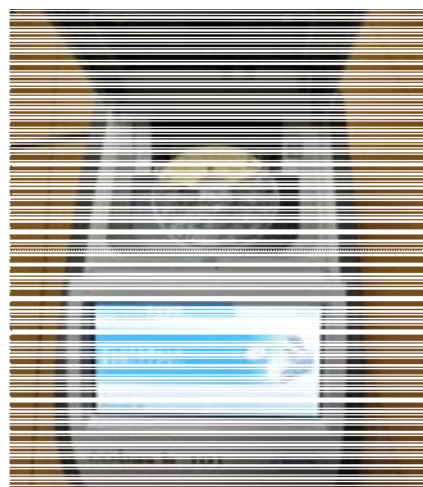

7. 試薬を8分以内にセットし蓋を閉じると
測定を開始します。



8. およそ6分で結果が表示されます。